



Manual de usuario

Lámpara Cuello de ganso

LUZ LED portátil

Retírelo cuando todos los frenos en la rueda base estén Liberado, activar los frenos mientras trabajas. Manéjelo con cuidado en caso de que esté fuera de forma y daños cuando está en instalación y uso. Límpielo con un paño suave humedecido con alcohol u otro detergente suave con cuidado.

Marca: Jianshifu
Modelo: JSF-JCA02
Procedencia: China



No.	Nombre
1	Interruptor
2	Adaptador de lámpara
3	Brazo de lámpara
4	Caja de atenuación
5	Conexión de ajuste de altura
6	Línea eléctrica
7	Tubo recto
8	Conexión de hierro
9	Base
10	Rueda

I. Esquema

Esta lámpara LED portátil está diseñada para uso en quirófanos pequeños, exámenes ambulatorios y consultorios médicos, iluminación con Osram importada de Alemania, con luz estable y tiempo de trabajo prolongado. El filtro de color de vidrio crea una luz blanca y suave como la luz natural. Este producto es apto para exámenes físicos, pequeñas operaciones de otorrinolaringología, departamento de ginecología y obstetricia y departamento de pacientes ambulatorios, también funciona como iluminación asistida en operación.

II. Parámetro técnico principal III. Lista de embalaje

Potencia de la bombilla	9W
Iluminación (300 mm)	30000Lux
Temperatura del color	6500K
Vida útil de la lámpara	≥50000h

Soporte de lámpara	1
Base	1
Rueda	5
Tornillo	2
Anillo de hierro	1
Manual de usuario	1

IV. Instalación



1°. Recoge las ruedas y la base de la caja



2°. Montar las ruedas con la base



3°. Recoge el anillo de hierro y los tornillos.



4°. Elige el portalámparas



5°. Conecte la base y portalámparas con el icono del anillo y luego apriétalos con los tornillos



6°. Instalación terminada

V. Uso




1°. Enciende la luz

- A. Enchufe la fuente de alimentación
- B. Precione el interruptor en la cabeza de la lámpara (Parte Nro.1)
- C. Precione  en la caja de atenuación (Part No.4)



2°. Ajustar brillo

Presione  para ajustar el brillo

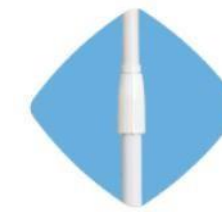

3°. Ajustar la altura de la lámpara

Desenrosque la cubierta blanca (Parte No.5), suba o baje el portalámparas a la posición adecuada, apriete la cubierta blanca.